

Használati útmutató

2

IM2-HEM-6181-E-HU-05-04/2022

Használat előtt olvassa el az 1 és 2 Használati útmutatót.

1

Az elemek behelyezése

1

2

3

1

2

All for Healthcare

2

Dátum és idő beállítása

1

EEEE/NN/HH/óó:pp

20 20

EEEE: 2018-2050

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

2

EEEE/NN/HH/óó:pp

10:00

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

3

EEEE/NN/HH/óó:pp

10:00

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

4

EEEE/NN/HH/óó:pp

10:00

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

5

EEEE/NN/HH/óó:pp

10:00

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

6

EEEE/NN/HH/óó:pp

10:23

HH: 1-12

NN: 1-31

óó: 0-23

pp: 0-59

3

A csuklómandzsetta felhelyezése

1

2

3

4

4

A megfelelő ülőhelyzet

5

Mérés

1

2



3

Automata csuklós
vérnyomásmérő
RS4 (HEM-6181-E)


OMRON



Memóriában tárolt értékek megtekintése

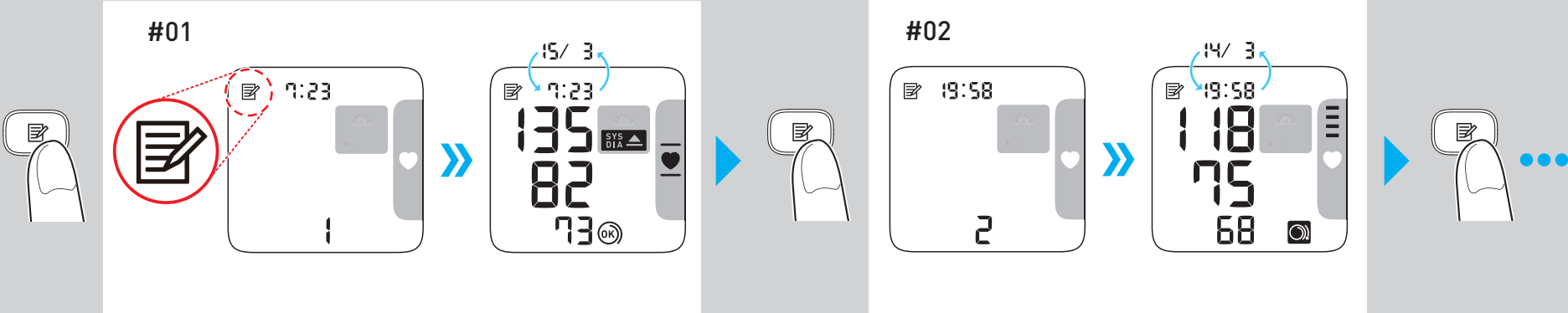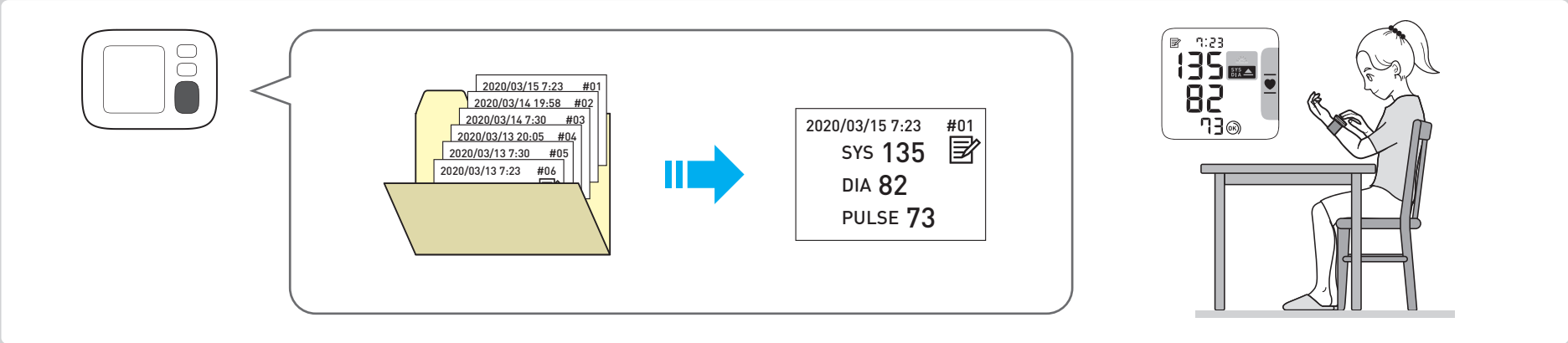

A memóriában tárolt összes mérési eredmény törlése

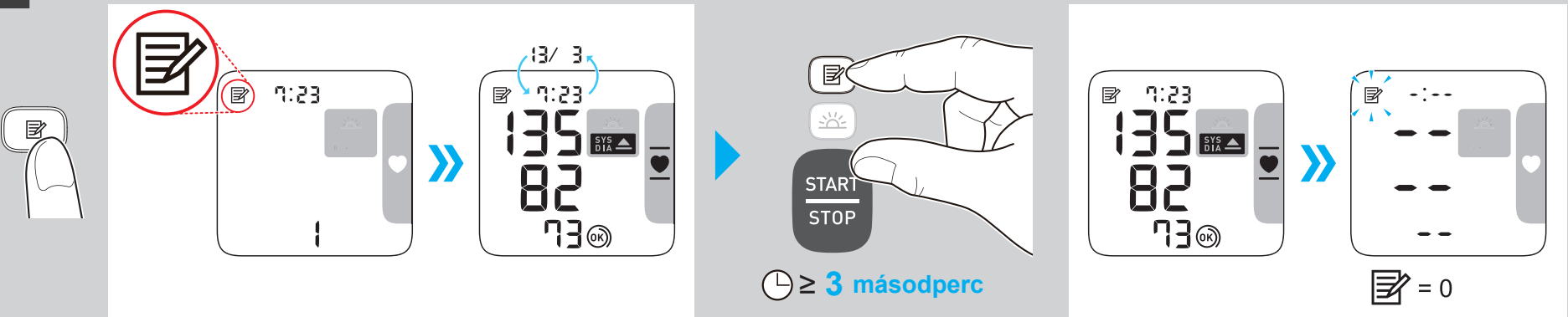

Szimbólumok leírása

	Érintkező rész - BF típus: Az áramütés elleni védelem szintje (áramszivárgás)		Hőmérsékletre vonatkozó korlát
	A vérnyomásmérő megfelelő pozícióját jelzi a csuklón. Mérhető csuklókerület		Páratartalomra vonatkozó korlát
IP XX	Az IEC 60529 által nyújtott IP-védettség foka		Légnyomásra vonatkozó korlát
CE	CE jelölés		A felhasználónak a használati útmutató leírásait kell követnie.
UKCA	UKCA jelölés		A felhasználó biztonsága érdekében a használati útmutató előírásainak pontos betartása szükséges
SN	Sorozatszám		Elem / Akkumulátor
UDI	Egyedi eszközazonosító		Egyenáram
MD	Orvostechnikai eszköz		A gyártás időpontja

Gyártó		OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN	
EU-képviselő		OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA www.omron-healthcare.com	
EC REP			
EU importőr			
Termékképviselő		OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnám	
Leányvállalatok	Egyesült királysági importőr és UK felelős személy	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors	
		OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH www.omron-healthcare.com/distributors	
		OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors	
Kiadás dátuma		2022-06-27	