

Elektromos orrszívó – Használati útmutató

NH-9

Használat módja:

1. Használat előtt áztassa a szívófejet 10 percre meleg, sós vízbe a fertőtlenítés érdekében. Ezután szerelje össze az orrszívót az útmutató szerint, kapcsolja be a készüléket, és kezdje el eltávolítani az orrváladékot az orrüreg faláról.
2. Mit tegyen, ha a váladék besűrűsödött, rászáradt? Először használjon fiziológiás sóoldatot vagy orrspray-t. Permetezze az orrüregbe, majd várjon 4–5 percet, amíg a váladék felpuhul.

Használati lépések:

1. A szívófej ne érjen közvetlenül az orr belsejéhez – a vákuum elvén működve szívja ki a váladékot.
2. A babát félig ülő vagy félig fekvő helyzetben helyezze el, a feje legyen kissé hátrahajtván (ha az orr száraz, előbb nedvesítse be sóoldattal vagy orrspray-vel).
3. Kapcsolja be a készüléket (két fokozat közül választható). Tartsa kb. 45°-os szögben a szívófejet az orrnyíláshoz, zárja le a nyílást, hogy zárt teret képezzen (ha a zárás megfelelő, a készülék hangja erősebb lesz).
4. Közben a másik orrnyílást ujjával óvatosan zárja el 1–2 másodpercre. Ezt ismételje addig, amíg a váladék eltávolításra kerül.

Egyéb váladékpuhító módszerek:

- **1. módszer:** 1–2 csepp szeszámolaj cseppentése az orrba. 10–15 perc alatt felpuhítja a váladékot, majd könnyebben kiszívható. (Tradicionalis módszer, mellékhatása nincs, orvosok is ajánlják.)
- **2. módszer:** Meleg vízbe áztatott gézzel vagy fültisztító pálcikával gyengéden melegítse az orr környékét 3–5 alkalommal, majd használja az orrszívót.
- **3. módszer:** Cseppentsen egy kevés halmájolajat az orrba, várjon 10–15 percet, majd szívja ki a váladékot.

⚠ **Fontos:** Ne alkalmazzon erőszakos vagy durva módszert a baba orrának tisztítására!

Ügyfél visszajelzés alapján az 1. módszer a leghatékonyabb és legbiztonságosabb.

Mit tegyen, ha nem látja a váladékot, de hallja, hogy az orr sípol, hurutos?

- **Tipp 1:** Baba fültisztító pálcikát mártson szeszámolajba, majd óvatosan tisztítsa ki apránként a váladékot. Ha nem sikerül, várjon néhány napot, amíg magától kijön.
- **Tipp 2:** Enyhe orrdugulás esetén helyezzen meleg törölközőt az orrnyereg környékére. Súlyosabb esetben reszelt gyömbéret pirítson, tekerje gézbe, és kösse a baba talpára.
- **Tipp 3:** Hagyma főzőlevével nedvesített, kicsavart (nem túl száraz) törölközőt helyezzen a baba orrára néhány percre.
- **Tipp 4:** Forró vízbe mártott, majd kicsavart gézzel vagy vattapálcával melegítse az orrnyeret, rövid időn belül a váladék fellazul és távozik.

Gyártó: Little Doctor Electronic (Nantong) Co., Ltd, No.8 Tongxing Road Economic & Technological Development area 226010 Nantong, Jiangsu, Kína, dulh@lordmed.com

EC REP: Little Doctor Europe Sp.zo.o., St. Zawila 57G 30-390 Krakko, Lengyelország, serwis@littledoctor.pl

Importőr: CARBON WEB Kft., 5600 Békéscsaba, Balassa u. 16, carbonmedoffice@gmail.com